



Beinio[®]therm

Moorwärmekissen Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Moorkissen aus dem Hause Beinio entschieden haben!
Bei dem Produkt handelt es sich um ein patentiertes Medizinprodukt der Klasse 1. Es bietet Ihnen sanfte Heilung und Entspannung mit natürlichen Inhaltsstoffen. Die Moorfüllung ist ein modifiziertes Naturprodukt, Farbschwankungen und Verfärbungen sind natürlich bedingt. Der Torf wird aus regenerativem Abbau in Deutschland gewonnen. Die Wärmekissen werden in Deutschland, am unteren Niederrhein, produziert.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise. Die hochwertigen Moorwärmekissen werden Ihnen dann lange Jahre ein angenehmer Helfer sein.

Anwendung in der Wärmetherapie – ideal bei Verspannungen:

Bei einer Temperatur von 40 – 43°C entspannen sich die Muskeln und die Regenerationsfähigkeit des Körpers wird gesteigert. Die erhöhte Durchblutung regt den Stoffwechsel an, fördert den natürlichen Heilungsprozess und steigert das Wohlbefinden. Lang andauernde Wärme lindert Schmerzen !

Anwendungsgebiete:

Rückenschmerzen, Zerrungen, Verrenkungen, Arthrose, Nackensteife, Gallen- und Leberschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden, Gynäkologische Beschwerden, Ischias

WÄRMEANWENDUNG			
Artikel	<u>beinio®therm</u> <u>Moor-Wärmekissen</u> 	<u>beinio®therm</u> <u>Moor-Nackenkissen</u> 	<u>beinio®therm</u> <u>Moor-Rückenkissen</u> 
<u>Mikrowelle</u> (bei max: 600 Watt): Alle zwei Minuten stoppen und Kissen durchkneten	ca. 3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern	ca. 3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern	ca. 3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern
<u>Backofen-</u> <u>auf Teller legen</u> (bei max: 120 °C Nicht vorwärmen	ca. 10 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten Schritten verlängern	ca. 12 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten Schritten verlängern	ca. 15 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten Schritten verlängern
Sicherheitshinweis: Achtung: Lassen Sie das Moorkissen beim Erhitzen nicht unbeobachtet! Sollte sich das Produkt aufblähen, schalten Sie die Mikrowelle oder den Backofen aus und überprüfen das Kissen nach dem Abkühlen auf Schäden. Überhitzen des Kissen kann zu Rissen und undichten Stellen führen. Das Kissen nicht mit heißem Metall in Berührung bringen.			

Anwendung in der Kältetherapie – ideal bei Entzündungen:

Kälte dämpft Entzündungen, da die verringerte Körpertemperatur die Aktivität der Entzündungsmediatoren hemmt. Zunächst werden bei der Kältetherapie Gefäßreaktionen ausgelöst und die Muskeln spannen sich an. Das Schmerzempfinden reduziert sich. Bei längerer Anwendung verringert sich die Muskelaktivität, die Muskelspannung wird gesenkt und Verkrampfungen lockern sich.

Anwendungsgebiete:

Entzündungen, Kopfschmerzen, Migräne, Kreislaufbeschwerden, Fieber, Insektenstiche, Prellungen, Knochenbrüche

KÄLTEANWENDUNG			
<u>Artikel</u>	bejnio@therm Moor-Wärmekissen 	bejnio@therm Moor-Nackenkissen 	bejnio@therm Moor-Rückenkissen 
<u>Gefrierschrank</u>	max. 2 Stunden bei -10 °C	max. 2,5 Stunden bei -10 °C	max. 3 Stunden bei -10 °C
<u>Kühlschrank</u>	dauerhafte Lagerung möglich	dauerhafte Lagerung möglich	dauerhafte Lagerung möglich

Wichtige Hinweise:

Vor der Anwendung bitte die Temperatur vorsichtig mit dem Handrücken testen. Um mögliche Hitze- oder Kälte-reaktionen auf der Haut zu vermeiden, legen Sie das Kissen nach der Aktivierung in ein Handtuch oder eine Schutzhülle. Bedenken Sie, dass bereits bei Temperaturen ab 50°C Verbrennungen auftreten können. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern! Es besteht u.a. Erstickungsgefahr. Das Moorkissen darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht wahrnehmen kann. Verwenden Sie diesen Artikel deswegen nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen und hitzeunempfindlichen Personen. Nicht im Zusammenhang mit schmerzstillenden Mitteln verwenden. Kältetherapie nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.

Durch spitze und scharfe Gegenstände oder Überhitzung können Schäden an dem Moorkissen entstehen. Es darf dann nicht mehr angewendet werden! Bitte überprüfen Sie das Kissen vor jeder Anwendung, nach dem Erwärmen, auf Schäden. Sollte das Kissen undicht sein, bitte nicht mehr verwenden, da andere Gegenstände verschmutzt werden. Für etwaige Folgeschäden kann keine Garantie übernommen werden. Bei der Ausführung mit ätherischen Ölen ist das Aroma, bzw. die Duftintensität abhängig von der Häufigkeit der Anwendung und kann sich entsprechend verringern.

Aufbewahrung und Pflege: Wir empfehlen die Aufbewahrung in der mitgelieferten Verpackung.

Die Gebrauchsanleitung ist sorgfältig aufzubewahren. Das Moorkissen bitte nach der Benutzung mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken lagern.



blue bell cosmetic GmbH
 Wöhrmannstraße 15
 D-47546 Kalkar-Kehrum

Tel: +49 2824 2083-0
 www.blue-bell.de
 info@blue-bell.de

